


## EQUIPO ENTERAL COM REGULADOR DE FLUXO GMI

### APRESENTAÇÃO:

- Equipo para infusão enteral 1 (uma) ou 2 (duas) vias
- Tubo extensor em PVC flexível roxo cristal
- Conector escalonado com tampa protetora
- Via com ponta perfurante ou Via com ponta perfurante e conector EnPlus
- Regulador de fluxo
- Câmara de gotejamento transparente cristal
- Fita métrica de 1000 mm

### ESQUEMA DO PRODUTO

#### 1 Via

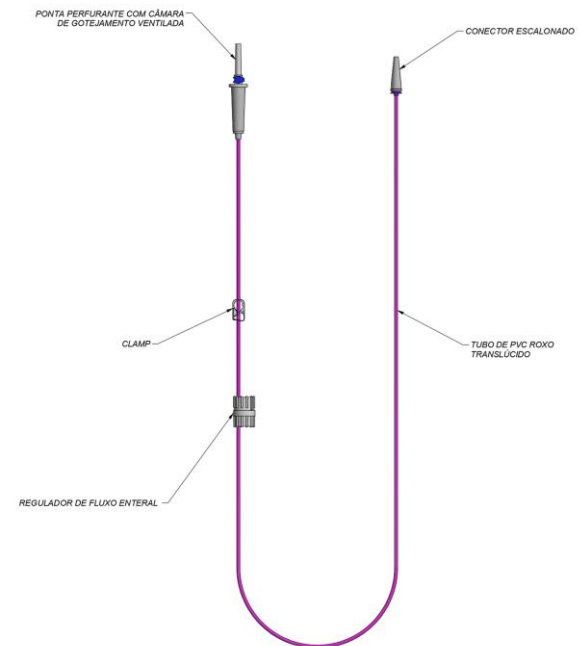


Fita métrica

Código	Vias	Tipo de ponta	Tipo de conector	Fluxo min (ml/min)	Fluxo máx (ml/min)	Comp. (mm)
340-1-PPES	01	Perfurante	Escalonado	18	917	1500
340-2-PPEPES	02	Perfurante/ Enplus	Escalonado	18	917	1500
340-1-EPES	01	Enplus	Escalonado	18	917	1500

2 Vias

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

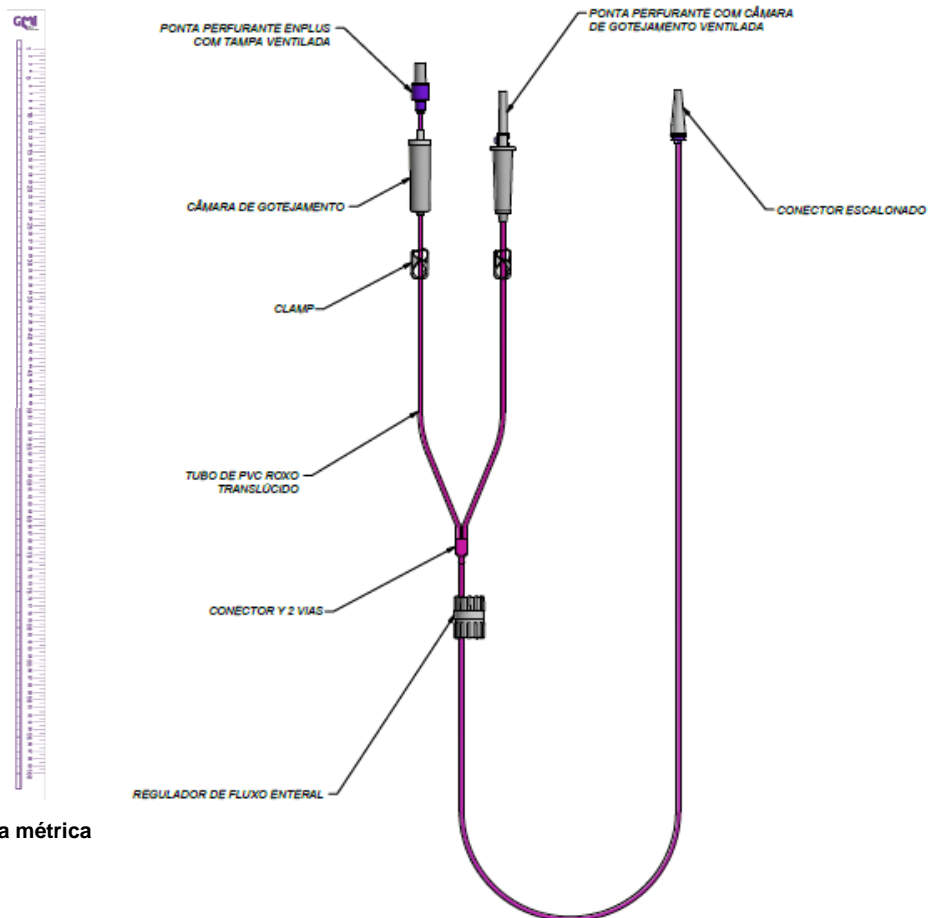

Fita métrica

**STERILE EO**

Esterilizado por óxido de etileno.



Produto de uso único. Proibido reprocessar

### EMBALAGEM

Filme laminado com cobertura em papel grau cirúrgico apto a esterilização com impressões de características, lote de produção, uso e etiqueta exigida pela autoridade sanitária competente.

### DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

### EFEITOS COLATERAIS

Desde que utilizado de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações e efeitos colaterais.

Resp. Técnica - Dra. Josimara dos Santos Almeida Possidonio CRF-SP:54.659  
REG ANVISA: 80423540075



**GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.**  
Rua Tapiraí, 39 – Comp. 51/63/75 – Jardim Leocádia  
CEP 18085-300 Sorocaba – SP  
CNPJ 08.633.431/0001-05 Tel/fax:15 3238-4100

## DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

O Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo GMI é um dispositivo para infusão, que possibilita a conexão entre o recipiente de soluções (frasco ou bolsa) à sonda de alimentação enteral e viabiliza o controle de fluxo de soluções.

Apresenta-se como um tubo de PVC flexível de aproximadamente 1500 mm, em uma extremidade apresenta a câmara de gotejamento com a ponta perfurante ou EnPlus que se adapta tanto a bolsa ou ao frasco. No meio do tubo se localiza o regulador de fluxo, o qual controla o gotejamento e o fluxo da solução com auxílio da gravidade. Na outra extremidade possui o Conector escalonado o qual possibilita encaixe em vários tipos de dispositivos de infusão, evitando vazamentos.

## FINALIDADE

O equipo enteral com regulador de fluxo é utilizado para infusão de soluções enterais que permite o controle e dosagem do fluxo.

Sendo dois modelos de Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo Simples 1 (uma) via utilizado para administração de alimentação enteral de sistema aberto ou fechado e água, para hidratação do paciente.

Equipo de Infusão Enteral com Regulador de Fluxo Duplo 2 (duas) vias usado para a administração de alimentação enteral de sistema aberto ou fechado e água, para a hidratação do paciente..

## INSTRUÇÕES DE USO

- Alimentação Sistema Aberto

- 1) Siga a instrução do fabricante para abertura da embalagem de nutrição enteral. Recomenda-se agitar a solução por pelo menos 60 segundos.
- 2) Transfira a solução para frasco de alimentação enteral.
- 3) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição "OPEN".
- 4) Remova a tampa plástica da ponta perfurante.
- 5) Com a sua mão dominante, insira a ponta perfurante na tampa do frasco, cobrindo-a completamente.
- 6) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o estômago do paciente.
- 7) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente. Verifique a abertura da válvula de ar
- 8) Abra o clamp para realizar o preenchimento de toda linha do equipo.
- 9) Quando a solução enteral sair do conector distal, feche o clamp.
- 10) Gire o regulador de fluxo na posição OFF.
- 11) Conecte o equipo à sonda do paciente.
- 12) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à solução enteral
- 13) Abra o clamp.
- 14) Quando o frasco estiver vazio, gire o regulador de fluxo na posição "OFF"
- 15) Feche a entrada de ar da câmara de gotejamento.

- Hidratação:

- 1) Coloque a água no frasco vazio ou reserve a bolsa.
- 2) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição "OPEN".
- 3) Remova a tampa plástica da ponta perfurante.
- 4) Com a sua mão dominante, insira a ponta perfurante na tampa do frasco, cobrindo-a completamente.
- 5) Abra o clamp para realizar o preenchimento de toda linha do equipo.
- 6) Quando a solução sair do conector distal, feche o clamp.
- 7) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o estômago do paciente.
- 8) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente.
- 9) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à água.
- 10) Após 15 segundos, abra a entrada de ar.
- 11) Conecte o equipo à sonda do paciente.
- 12) Abra o clamp.

- Alimentação Sistema Fechado

- 1) Siga a instrução do fabricante para utilização da nutrição enteral. Recomenda-se agitar a solução por pelo menos 60 segundos.
- 2) Feche o clamp. Deixe o regulador de fluxo na posição "OPEN".
- 3) Conecte o conector Enplus conforme instruções no frasco de alimentação enteral.
- 4) Suspenda o frasco com o equipo no suporte de soro com auxílio da fita métrica. A suspensão de 50 cm deve ser do conector superior conectado a bolsa ou frasco até o estômago do paciente
- 5) Abra o clamp para realizar o preenchimento de toda a linha do equipo.
- 6) Aperte a câmara de gotejamento para enchê-la até 1/3 aproximadamente.
- 7) Quando a solução enteral sair do conector distal, feche o clamp.
- 8) Gire o regulador de fluxo na posição "OFF".
- 9) Conecte o equipo à sonda do paciente.
- 10) Ajuste o regulador de fluxo na posição da escala que se refere à solução enteral
- 11) Abra o clamp
- 12) Quando o frasco estiver vazio, gire o regulador de fluxo na posição "OFF"

- Alimentação Intermitente

Repita os passos para alimentação e hidratação de uma via, seguindo os volumes indicados pelo profissional de saúde, mantendo o clamp fechado na via que não está sendo utilizada.

Cuidado: Não administrar simultaneamente alimentação enteral e hidratação, pois o regulador de fluxo trabalha apenas com uma solução por vez.

## CONTRAINDICAÇÕES

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contraindicações.

## PRECAUÇÕES

1. Este é um produto descartável, para utilização em um paciente.
2. Não utilize o produto se a embalagem estiver violada sem garantia de esterilização;
3. Não reesterilizar o produto.

4. Não utilizar após o prazo de validade;
5. A esterilidade é garantida se a embalagem estiver intacta e lacrada. As embalagens que preservam as condições originais de esterilidade do produto só devem ser abertas ao executar-se o procedimento de inserção.
6. Deve-se tomar cuidado com o uso de instrumentos cortantes, que possam causar cortes ou danos na superfície externa do produto.
7. Todo produto deve ser aplicado sob a estrita supervisão de um profissional de saúde habilitado e treinado. Deve ser monitorado pelo profissional durante a aplicação e o tempo que esteja no tratamento sobre o paciente
8. Utilize o produto de acordo com a prática definido pela instituição.
- 9.. Deve-se considerar que a técnicas de utilização, cuidado com o produto e remoção podem variar de acordo com as circunstâncias específicas de cada caso.
10. Avaliar constantemente a cor da pele e tensão abdominal.
11. Respeite as indicações médicas e protocolos institucionais.

#### ADVERTÊNCIAS

1. Manter o produto em lugar fresco e arejado.
2. Realizar os cuidados posteriores segundo critérios institucionais /profissionais.
3. Este é um produto descartável, para uso em um único paciente.
4. Produto de Uso único. Proibido Reprocessar.
5. Produto exclusivo para infusão de dietas entéricas.
6. Certifique-se se todas as conexões são compatíveis e adequadas ao uso.
- 7- Nunca utilize produtos fora do prazo de validade.
- 8- Este produto deve ser manuseado por profissionais da área da saúde habilitados.
- 9- Se a embalagem estiver violada não utilize o produto.
- 10- Atentar para as instruções de uso antes de proceder a utilização do produto.
- 11- Evitar quaisquer adaptações ou improvisações irregulares.

#### RECOMENDAÇÕES

1. Verificar a integridade da embalagem.
2. Verificar as datas de esterilização e vencimento.
3. Manter o produto em lugar fresco, protegido de raios solares.
4. Realizar os cuidados posteriores segundo critérios institucionais / profissionais.
5. Produto não deve ser reesterilizado ou reutilizado, pois pode causar danos ao produto e/ou a saúde do paciente.
6. É recomendado uso único por um período não superior a 24 horas para cada embalagem de dieta administrada.

#### Modelo 02 vias



#### Modelo 01 via

