

## INSTRUÇÕES DE USO CONJUNTO DE DISCOS ESPAÇADORES


### APRESENTAÇÕES

São discos de silicone grau médico com espessura de 1 a 5 mm , apresentados nos seguintes códigos.

**Tabela 1 - Dimensões e códigos**

Discos Espaçadores		
Código	FR	Composição
351-CDE-18FR	18	5 unidades - 18 FR – 1 a 5 mm
351-CDE-20FR	20	5 unidades - 20 FR – 1 a 5 mm
351-CDE-24FR	24	5 unidades - 24 FR – 1 a 5 mm

### ESQUEMA DO PRODUTO

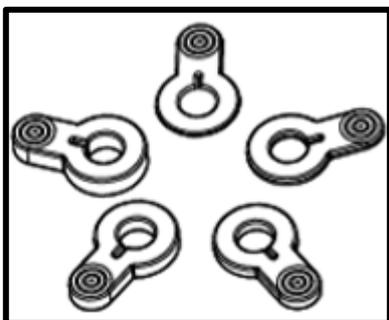

### FINALIDADE/ INDICAÇÕES

- Os discos são acessórios indicados quando há necessidade de ajuste do botão de gastrostomia ao nível da pele, sem necessidade de troca do dispositivo, pode ser adquirido separadamente, o conjunto possui 5 unidades com espessura de 1 a 5 mm para o tamanhos 18, 20 e 24 FR;
- Deve ser encaixado através do tampa do botão e posicionado logo abaixo ajustado ao nível da pele, conforme figura nº 01.

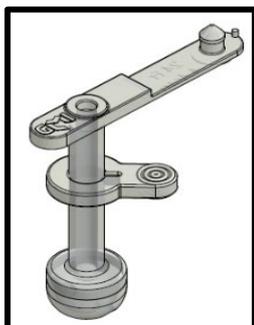


Figura nº01 – Posição disco espaçador

### CONTRAINDICAÇÕES/ EVENTOS ADVERSOS

- Se utilizado conforme as instruções não existem contra-indicações e ou eventos adversos.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
- A colocação deve ser efetuada por (ou sob instruções de) um profissional habilitado neste tipo de procedimento.
- Avaliar constantemente as características do estoma.
- Verificar periodicamente a correta posição do botão e integridade do balão.
- Realizar o procedimento obedecendo a normas de assepsia.
- Não exerça pressão excessiva durante a colocação para evitar o deslocamento do produto.

### EMBALAGEM

O kit é fornecido em embalagem plástica zip.

### DESCARTE

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais contaminados.



**PRODUTO NÃO ESTÉRIL**



**PROIBIDO REPROCESSAR**



ACESSE O QR CODE PARA MAIORES INFORMAÇÕES

SAC - [qualidade@gmimedical.com](mailto:qualidade@gmimedical.com)

Resp. Técnica - Dra. Josimara dos Santos Almeida Possidonio -  
CRF-SP 54.659  
REG ANVISA: 80423549007



**GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.**  
Detentor do Registro: CNPJ 08.633.431/0001-05  
Fabricado por: CNPJ 08.633.431/0003-69  
Av: Victor Andrew, 521, Bairro: Zona Industrial  
CEP 18086-390 Sorocaba – SP  
Tel/fax: 15 3238-4100

**SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS**

